

Suturas B. Braun VetCare MonoPlus®




Sutura monofilamento absorbible a largo plazo de polidioxanona

**EL MONOFILAMENTO
CON UN PLUS DE
SEGURIDAD**

MonoPlus® es la sutura ideal para las incisiones que requieran un periodo de cicatrización superior a 4 semanas

Pérdida gradual de la fuerza tensil

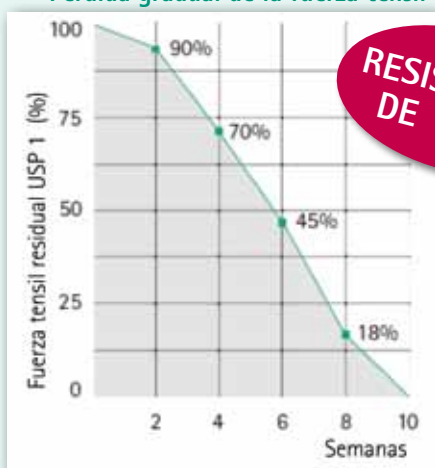

Características	Ventajas
Monofilamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paso suave por los tejidos ■ Sin capilaridad
Polidioxanona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mínima reacción tisular ■ Excelente flexibilidad ■ Elongación adecuada ■ Fácil anudado
Pérdida de resistencia gradual	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ideal para tejidos que requieren soporte de la herida por más de 4 semanas


TÉCNICA DE LOOP PASO A PASO:



Atravesar la pared abdominal



Pasar la aguja por dentro del "loop"

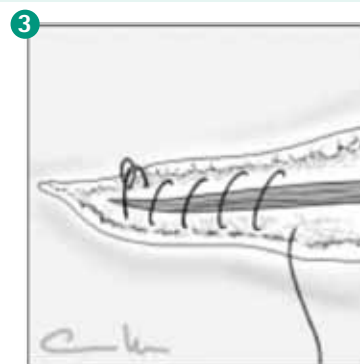

Sutura continua

MonoPlus® aporta un plus de seguridad en el cierre de la incisión, ya que la cicatrización puede verse retardada o dificultada en algunos casos.




■ OBESIDAD

En los animales obesos la presión de las vísceras abdominales sobre la incisión puede provocar el fracaso de la sutura y su dehiscencia precoz.

■ ALTERACIONES METABÓLICAS Y ENDOCRINAS



Enfermedades como el **Síndrome de Cushing**, la **diabetes** o las **hipoproteinemias** pueden provocar un retraso en los tiempos de cicatrización.

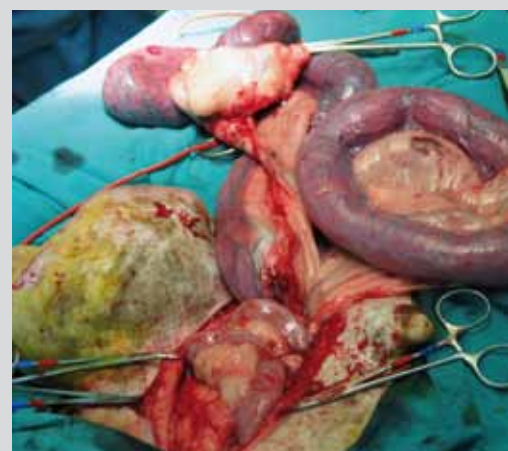


...necesitan de soporte externo durante

MonoPlus® se presenta también en forma de lazo (loop), especialmente indicado para el cierre de laparotomías por sus ventajas:


- Evita el nudo inicial, reduciendo el tiempo quirúrgico
- Al ser un hilo doble, le aporta el doble de resistencia a la sutura.

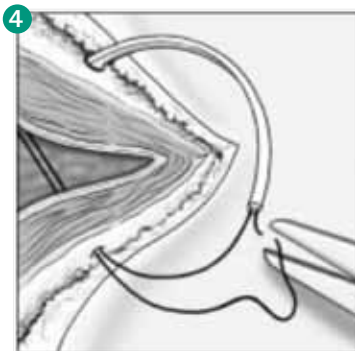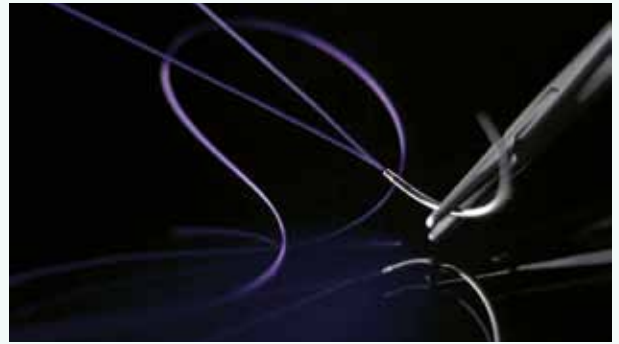

4 Cortar uno de los dos cabos para hacer el nudo final

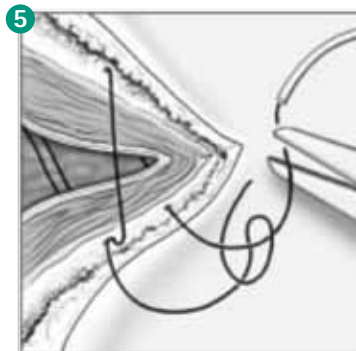

5 Anudado final

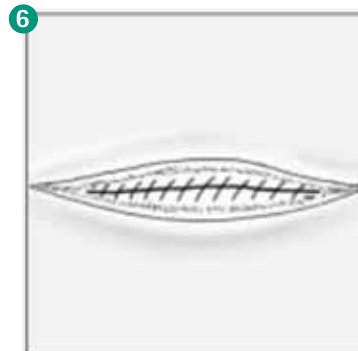

6 Sutura finalizada

Laparotomías en aquellas situaciones












■ RIESGO ELEVADO DE INFECCIÓN DE LA INCISIÓN

En las cirugías abdominales potencialmente contaminadas (piometras perforadas, enterotomías, gastrotomías, cistotomías...) una sutura como MonoPlus® aporta seguridad y confianza en el cierre de la incisión quirúrgica.



■ ALTERACIONES DE LA CICATRIZACIÓN

Siempre que se prevea una cicatrización lenta o dificultosa, por motivos sistémicos (sepsis, malnutrición, inmunosupresión, corticoterapia...) o locales (infección, lamido...), MonoPlus® es la sutura de elección.

Aguja longitud mm	Hilo longitud cm	USP métrico							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica									
	70		G0024133	G0024134	G0024135	G0024136			
	70			G0024634	G0024635				
	70			G0024024	G0024025	G0024026	G0024027		
	150						G0024567	G0024568	
Aguja 1/2 círculo punta trócar									
	150						G0024342	G0024343	
	150						G0024394	G0024393	
Aguja 1/2 círculo punta triangular									
	70				G0024185	G0024186	G0024187	G0024188	
	90					G0024114	G0024115	G0024116	
	90						G0024117	G0024118	G0024119