

# Equipos de infusión

Infusomat®, Perfusor® y Accesorios



Precisión y seguridad en infusión continua

# Infusomat® fmS

## Bomba de infusión volumétrica de alta precisión

Infusomat® fmS es un equipo preciso que incorpora un software avanzado junto con nuevas funciones de gran utilidad en la clínica veterinaria.

### Nuevas funciones Infusomat® fmS

- **Cálculo del flujo de infusión de dosis:** cálculo del ratio de infusión de dosis en función del peso del paciente, la concentración del fármaco a administrar y la dosis requerida
- **Función bolo:** dosificación adicional del medicamento, de forma manual o con volumen preseleccionado
- **Control de volumen de alarmas acústicas:** regulación de las alarmas acústicas del equipo, evitándose de este modo un stress innecesario para el animal y el personal veterinario
- **Velocidad de Mantenimiento de Vía Abierta: MVA**  
Reducción automática de la velocidad de infusión durante 30 minutos en el momento en que el tiempo de infusión preseleccionado o el volumen de infusión preseleccionado haya transcurrido

### Perfil técnico (datos de infusión)

**Velocidad de infusión:** 0,1 a 999,9 ml/h en incrementos de 0,1  
**Preselección de volumen:** 0,1 a 9999,9 ml  
**Preselección de tiempo:** 1 minuto hasta 99 h y 59 min  
**Precisión:** +/- 5%  
**Velocidad máxima de bolo:** 999,9 ml/h  
**Velocidad de MVA:** 3 ml/h con flujos > 10 ml/h o 1 ml/h con flujos < 10 ml/h

### Dispositivos de seguridad

**Sensor de gotas:** Sensor óptico  
**Límites de presión de oclusión:** Ajustable en tres niveles: Bajo (0,4 bar), Medio (0,8 bar), Alto (1,2 bar)  
**Sensor de aire en línea:** Sensor ultrasónico que activa la alarma cuando la burbuja de aire supera los 0,3 ml o un valor acumulado en 1 hora de 1,5 ml (a partir de burbujas de volumen superior a 0,01 ml)  
**Detección de dosificación errónea:** En caso de detectar un error en la infusión superior a 0,6 ml activa la alarma y se detiene



Código	Denominación	Unidades de venta
8715459	Infusomat® fmS	1
425060	Infusomat® fmS-r	1

# Perfusor<sup>®</sup> fm

## Equipo de infusión con jeringa

Perfusor<sup>®</sup> fm es un equipo de infusión con jeringa caracterizado por su alta precisión así como por su fácil manejo.

### Perfusor<sup>®</sup> fm ofrece un amplio rango de funciones especiales

- **Cálculo del flujo de infusión de dosis:** cálculo del ratio de infusión en función del peso del paciente, la concentración del medicamento a administrar y de la dosis prescrita
- **Función bolo:** se puede aplicar con volumen predefinido, manual o a intervalos fijados
- **Reducción del bolo:** en caso de oclusión Perfusor<sup>®</sup> fm reduce la sobrepresión para evitar daños al paciente
- **Fijación automática de la jeringa:** de una forma fácil y con una única mano

### Perfil técnico (datos de infusión)

Velocidad de infusión: 0,1 a 200 ml/h en incrementos de 0,1

Preselección de volumen: 0,1 a 999,9 ml

Preselección de tiempo: 1 minuto hasta 99 h y 59 min

Precisión: +/- 2%

Velocidad máxima bolo: 1.800 ml/h

### Dispositivos de seguridad

**Prealarma de jeringa:** Avisa entre 3 y 30 minutos antes de que la jeringa quede vacía

**Límites de presión de oclusión:** Ajustable en nueve niveles: entre 0,2 bar y 1,2 bar

**Reducción de bolo:** Automática en caso de detectar una oclusión

**Detección de dosificación errónea:** En caso de detectar un error en la infusión superior a 0,01 ml activa la alarma y detiene la bomba automáticamente



Código	Denominación	Unidades de venta
8713871	Perfusor <sup>®</sup> fm	1
394963	Perfusor <sup>®</sup> fm-r	1

# Perfusor® compact

## Equipo de infusión con jeringa

Perfusor® compact aporta máxima comodidad y fiabilidad.

### Características

- **Comodidad:** Sencillo manejo y reducidas dimensiones
- **Fiabilidad:** Perfusor® compact muestra un manejo intuitivo y sencillo, ofreciendo altas prestaciones y máxima fiabilidad
- **Autonomía de funcionamiento:** Perfusor® compact optimiza sus recursos para garantizar una infusión durante más de 80 horas
- **Detección automática de jeringa:** Perfusor® compact detecta automáticamente el volumen de la jeringa introducida, siendo necesario únicamente su confirmación

### Perfil técnico (datos de infusión)

Velocidad de infusión: 0,1 a 99,9 ml/h en incrementos de 0,1

Preselección de volumen: 0,1 a 999,9 ml

Precisión:  $\pm 2,5\%$

Velocidad máxima de bolo: 800 ml/h

### Dispositivos de seguridad

**Prealarma de jeringa:** Avisa entre 3 y 30 minutos antes de que la jeringa quede vacía

**Límites de presión de oclusión:** Ajustable en tres niveles: Bajo, Medio y Alto con 1,2 bar máximo

**Reducción de bolo:** Automática en caso de detectar una oclusión

**Detección de dosificación errónea:** En caso de detectar un error en la infusión superior a 0,015 ml activa la alarma y detiene la bomba automática




Código	Denominación	Unidades de venta
8714827	Perfusor® compact	1
419384	Perfusor® compact-r	1

# Accesorios

## Accesorios Infusomat® Equipos

Código	Denominación	Unidades de venta
8700036	Equipo Infusomat® estándar	100
8700125	Equipo Infusomat® Secura opaco	100
8700087	Equipo Infusomat® con toma medicamento	100
8270066	Equipo Infusomat® Secura sangre 200	100

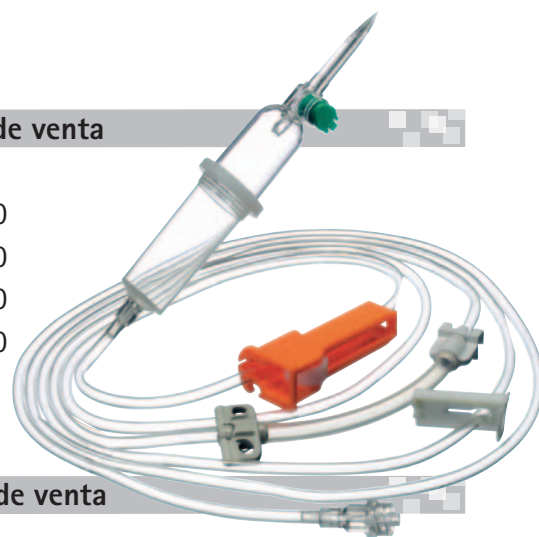

## Accesorios Infusomat® Portabombas

Código	Denominación	Unidades de venta
8701644	Portasuero Infusomat® fm	1
34502700	Soporte suero	1
350942	Portabombas Braun	1
8727708	Nuevo Portabombas Infusomat®	1
351112	Portabombas triple Braun	1

## Accesorios Perfusor® Jeringas

Código	Denominación	Unidades de venta
8728623	Jeringa Perfusor® 20 ml sin látex	100
8728810F	Jeringa Perfusor® 50 ml sin látex	100
8728828F	Jeringa Perfusor® opaca 50 ml sin látex	100



## Accesorios Perfusor® Líneas

Código	Denominación	Unidades de venta
8723010	Línea Perfusor® opaca	100
8722960	Línea Perfusor® transparente	100
5204984	Línea transparente 20 cm	50
5205000	Línea transparente 50 cm	50



## Accesorios Perfusor® Sets

Código	Denominación	Unidades de venta
16417F	Set equipo sin látex ( jeringa 50 ml y línea transparente Polietileno )	30
4185633	Set equipo sin látex ( jeringa 20 ml y línea transparente PVC )	50



**B. Braun VetCare SA**

Ctra. de Terrassa, 121  
08191 Rubí (Barcelona)

**Servicio Atención Clientes**

Tel.: 902 47 47 01  
Fax: 902 48 48 01  
[atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com)  
[www.bbraun-veterinaria.es](http://www.bbraun-veterinaria.es)