

Meliseptol® Foam Pure

Desinfectante para productos sanitarios y equipos médicos de rápida acción

- Rápido y efectivo
- Listo para su uso
- Excelente compatibilidad con todo tipo de materiales
- Bajo contenido en alcohol
- No deja residuos en las superficies desinfectadas
- Ideal para su uso en combinación con B.Braun Wipes

Indicaciones

Especialmente indicado para la desinfección de material sanitario y equipos médicos como equipamiento quirúrgico, aparatos de ultrasonido, bombas de infusión, incubadoras o camas de hospital.

Posee una excelente compatibilidad con todo tipo de materiales, incluidos aquellos sensibles al alcohol, como plástico acrílico y pruebas de ultrasonido.

No contiene aldehídos ni alquilaminas y es un excepcional producto multiusos con aroma agradable y discreto.

Composición:

100g de solución contienen:

17 g 1-propanol, 0.23 g cloruro de didecildimetilamonio.

Excipientes: < 5% surfactantes no iónicos, agua purificada.

Datos físico químicos

Apariencia	Líquido transparente e incoloro
Densidad (20°C)	~0.98 g/ml
Punto de inflamación	+31.5 °C
pH	~7



Eficacia microbiológica:

Meliseptol® Foam Pure es efectivo frente:

Bacteria (incl. TbB) y hongos (incl. C. albicans)

Virus envueltos: Gripe A, VHC, VHC, VIH, Vaccinavirus

Virus no envueltos: Norovirus, Poliovirus i Rotavirus.

Microorganismo	Tests	Tiempo exp
Desinfección de superficies: Bacteria, hongos (C. albicans), virus encapsulados (incl. VHB, VHC, VIH, Vaccinavirus, BVDV) a. Rotavirus	DGHM/VAH 09/2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 DVV/RKI	Cond. limpias: 1 min (cond. sucias 2 min)
Hongos (<i>A. Brasiliensis</i>)	EN 13624	60 min
Micobacterias (<i>M. terrae</i>)	EN 14348 EN 14348	3 min 1 min
Virus de la gripe A	DVV/RKI	15 seg
Rotavirus	DVV/RKI	1 min
Norovirus (MNV)	EN 14476	5 min
Poliovirus	DVV/RKI	5 min

Dosificación e instrucciones de uso

Usar guantes. Los aparatos médicos deben desconectarse antes de su desinfección. Si no es posible, deben tomarse precauciones para asegurarse que el aparato no se pondrá en marcha mientras se lleva a cabo la desinfección. Limpiar la superficie a desinfectar con una toallita o paño de un solo uso impregnado con Meliseptol® Foam Pure y dejar secar. Esperar a que el tiempo de contacto haya transcurrido. No rociar directamente en las aperturas de los dispositivos médicos. No aclarar. Dejar secar completamente.

Almacenamiento

Proteger de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Inflamable.

Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Fecha de caducidad: 2 años

Presentación

Producto	Presentación	Cód. Braun
Meliseptol® Foam Pure 750 ml	C/12	19171
Meliseptol® Foam Pure 5 L	C/1	19288

Marcado CE 0123