




- Pinza para biopsia de tejidos blandos
- Muestra de tejido intacta
- Mínimamente invasiva
- Operativa con solo una mano
- Biopsia ecoguiada

PINZA DE BIOPSIA VET-CORE


CONFIRMA TU DIAGNÓSTICO DE UNA FORMA
SEGURA, FÁCIL Y CÓMODA

DIAGRAMA DE INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN


- 1

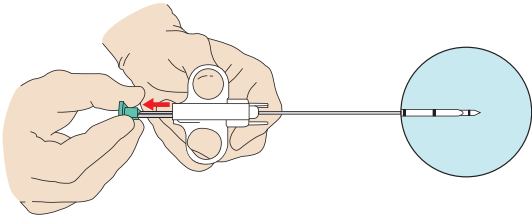

Antes de la inserción, preparar la pinza de biopsia Vet-Core tirando hacia atrás del émbolo hasta oír un "clic". La aguja quedará bloqueada en la posición correcta.
- 2

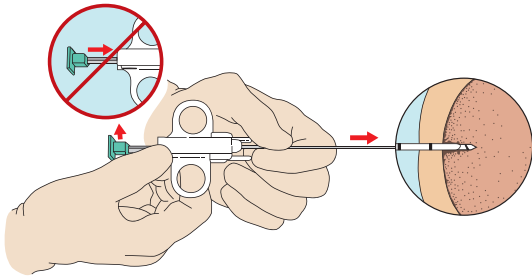

Con el estilete completamente retraído, la zona de la toma de muestra queda cubierta por la cánula de corte. Avanzar la aguja y detenerla 2cm antes de llegar a la zona de toma de muestra. No avanzar el estilete hasta que la aguja no esté en la posición correcta.
- 3

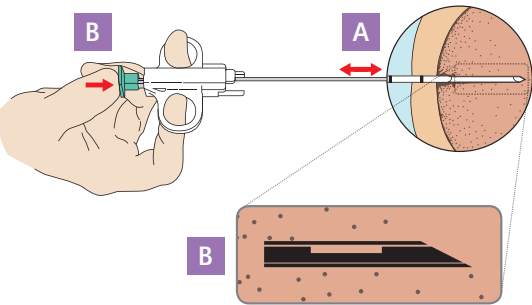

A

Mientras se mantiene la posición de la aguja, avanzar el estilete con el émbolo para exponer la zona de recogida y corte de la muestra.

B

Accionar la cánula (presionando el émbolo hasta oír un "clic") hacia el tejido para recoger y tomar la muestra.

4



Retirar la aguja de la zona de biopsia. Para recoger la muestra tomada, tirar hacia atrás el émbolo hasta sentir un "clic" firme que indica que la cánula queda bloqueada. Empujar el estilete hacia delante para exponer el tejido de la muestra. Retire el tejido de la muesca de toma de muestras.

Código	Descripción
VC1409	Aguja biopsia Vet-Core 14F 9cm
VC1415	Aguja biopsia Vet-Core 14F 15cm
VC1609	Aguja biopsia Vet-Core 16F 9cm
VC1615	Aguja biopsia Vet-Core 16F 15cm
VC1809	Aguja biopsia Vet-Core 18F 9cm



B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

