

LavaSurge®

Solución para el lavado e irrigación de heridas

DESCRIPCIÓN:

LavaSurge® es una solución para irrigación de heridas estéril.

LavaSurge® se basa en solución Ringer y contiene polihexanida (PHMB) como conservante y polietilenglicol Macrogol 4000.

La polihexanida evita el crecimiento de microorganismos en los apósitos y en la solución. Macrogol 4000 mejora la humectación de la superficie.

COMPOSICIÓN:

1 litro contiene:

- Solución Ringer
- Polihexanida 0,40 g
- Macrogol 0,02 g

INDICACIONES:

Para la limpieza e irrigación de heridas no infectadas e infectadas agudas y crónicas.

Para la limpieza e irrigación de heridas intraoperatorias.

Para la humectación de apósitos y vendajes con costras antes de retirarlos.

APLICACIÓN:

Toda la herida y la zona circundante se deben limpiar meticulosamente con LavaSurge®. Para una limpieza óptima, se recomienda mantener las heridas unos instantes empapadas con LavaSurge®, mediante una compresa saturada. La solución se debe usar sin diluir.

CONTRAINDICACIONES:

LavaSurge® no se debe usar:

- a) si se sabe que el paciente es alérgico a uno de los ingredientes del producto
- b) en el SNC o las meninges
- c) en el oído medio o interno
- d) en los ojos
- e) en cartílago hialino
- f) en combinación con tensoactivos aniónicos, jabones, pomadas, aceites, enzimas, etc.
- g) para lavado o irrigación peritoneal.

RESTRICCIÓN DE USO**a) Período de embarazo y lactancia:**

No existen datos de potencial mutagénico ni de embriotoxicidad asociados a los ingredientes de este producto. Debido a la falta de ensayos clínicos relevantes y de experiencias clínicas en embarazadas o en periodo de lactancia, LavaSurge® solo se debe usar en estos casos tras consultarlo previamente con un médico.

b) Recién nacidos y bebés:

Debido a la falta de ensayos clínicos correspondientes y de experiencias clínicas en recién nacidos y bebés, LavaSurge® solo se deberá usar en estos casos tras una cuidadosa interconsulta.

c) Efectos secundarios:

Polihexanida puede causar reacciones alérgicas, picazón (urticaria) y sarpullido (exantema). Aunque es poco frecuente (menos de 1 de cada 10.000), se han notificado casos de choques anafilácticos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- No utilice LavaSurge® para perfusión o inyección. No ingerir.
- Use solo soluciones transparentes. No utilice envases dañados.
- No mezclar con aditivos.
- ¡No re-esterilizar! Se podría alterar en gran medida su usabilidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO DE VALIDEZ

La fecha de caducidad figura en la etiqueta. ¡No utilizar después de la fecha de caducidad!

PRESENTACIONES

Producto	Código	Volumen	Unidades
LavaSurge®	19901	250 ml	10 por caja
LavaSurge®	19902	1000 ml	10 por caja